

Analsonde STM

zur Verwendung mit dem Gerät SM1 STM

für den ausschließlich persönlichen Gebrauch durch

Herrn/Frau _____



Art.-Nr. 101460



Gebrauchsanweisung Art.-Nr. 100882

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Produkt Analsonde STM wird unter ständiger Kontrolle der Qualität produziert. Dennoch sind einige Sicherheitsvorkehrungen stets zu beachten.

Zweckbestimmung

Die Analsonde STM dient dem Training der kontinenserhaltenden Muskulatur. Die Analsonde STM wird ausschließlich in Verbindung mit dem Gerät SM1 STM betrieben. Zu beachten sind auch die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Gerätes SM1 STM.

Den Anweisungen des behandelnden Arztes ist unbedingt Folge zu leisten!

Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitshinweise

Die Analsonde STM ist für die vorübergehende Anwendung (weniger als 60 Min.) bestimmt.

Achtung!

Der Druckaufnehmer der Analsonde STM darf weder aufgepumpt noch befüllt werden. Die Analsonde ATM ist immer in drucklosem Zustand zu verwenden.

Diese Analsonde STM ist aus hygienischen Gründen ausschließlich für den persönlichen Gebrauch durch eine Person bestimmt und ist vor der Erstbenutzung zu reinigen. Ihr Name kann in das hierfür vorgesehene Feld in dieser Gebrauchsanweisung eingetragen werden. Eine Benutzung durch mehrere Personen kann zu Infektionen führen.

Wenn Schmerzen beim Einführen der Analsonde STM oder während der Therapie auftreten, sollte vor Fortsetzung der Therapie Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden.

Beschreibung der Bildzeichen

CE Konformitätsnachweis in Bezug auf die Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.



Achtung, Begleitdokumente beachten!

REF

Diesem Symbol folgt die Artikel- bzw. Bestellnummer des Herstellers.




Diesem Symbol folgt die Chargenbezeichnung des Herstellers.

Verstellen der Fixierhilfe

Die Analsonde STM ist mit einer Fixierhilfe ausgestattet, die sich in fünf Stufen einstellen lässt. Mit ihr wird der Sitz des Druckaufnehmers der Analsonde STM im Anus festgelegt.

Zum Verstellen der Fixierhilfe hält man die Analsonde STM am unteren Ende fest und zieht oder schiebt die Fixierhilfe in die gewünschte Position. Hilfreich ist ein Anfeuchten der Analsonde STM und ein leichtes Hin- und Herbewegen der Fixierhilfe an ihrer Schmalseite.

Abstand Fixierhilfe – Mitte Druckaufnehmer: 15 mm bis 27 mm, in fünf Stufen verstellbar.

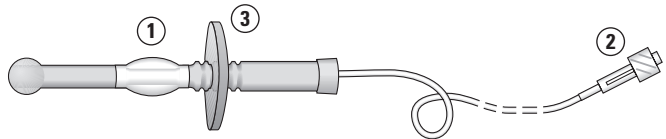

1. Druckaufnehmer
2. Sondenanschluss
3. Fixierhilfe

Reinigungs- und Desinfektionshinweise

Die Analsonde STM nach jedem Training mit Wasser reinigen und abtrocknen. Die Analsonde STM in trockenem Zustand aufbewahren. Die Analsonde STM kann mit Alkohol (70 %ig) gereinigt werden.



schwa-medico
Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Straße 41-43 · 35630 Ehringshausen
Tel. 06443 8333-444 · Fax 06443 8333-450
E-Mail hotline-tens@schwa-medico.de · www.schwa-medico.de

Hersteller:
Pierenkemper GmbH
Hörnshheimer Eck 19 · 35578 Wetzlar
www.pieren-tech.de
Art.-Nr. 451600-0030

