

Analsonde

für den ausschließlich persönlichen Gebrauch durch

Herrn/Frau _____



Gebrauchsanweisung Art.-Nr. 100811-V001

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Produkt Analsonde wird unter ständiger Kontrolle der Qualität produziert. Dennoch sind einige Sicherheitsvorkehrungen stets zu beachten.

Zweckbestimmung

Diese Sonde ist zum urologischen Beckenbodentraining konzipiert. Die Sonde darf ausschließlich in Verbindung mit einem für diese Anwendung bestimmten Reizstromgerät betrieben werden.

Den Anweisungen des behandelnden Arztes ist unbedingt Folge zu leisten!

Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitshinweise

Diese Sonde ist aus hygienischen Gründen ausschließlich für den persönlichen, mehrmaligen Gebrauch durch eine Person bestimmt. Ihr Name kann in das hierfür vorgesehene Feld in dieser Gebrauchsanweisung eingetragen werden. Eine Benutzung durch mehrere Personen kann zu Infektionen führen! Die Sonde ist nur zur Verwendung in einem Körperareal ohne offene Wunden bestimmt.

Handhabung

Zum Einführen können Sie, um die Gleitfähigkeit zu verbessern, die Sonde kurz mit Wasser benetzen, oder bestreichen Sie die Spitze der Sonde mit etwas Spezialsondengel. Schließen Sie die Sonde erst nach dem Platzieren an das Reizstromgerät an. Nach Beenden des Trainings schalten Sie zunächst das Reizstromgerät aus, und ziehen Sie den Stecker der Sonde aus dem Gerät. Nun entfernen Sie die Sonde, indem Sie sie am Sondenkörper anfassen. Nicht am Kabel ziehen! Bewahren Sie die gereinigte und getrocknete Sonde bei Nichtgebrauch in dem wiederverschließbaren Kunststoffbeutel zusammen mit dieser Gebrauchsanweisung auf. Ein pfleglicher Umgang und die Beachtung der Gebrauchsanweisung sowie der ärztlichen Angaben sind die Grundlage für eine lange Verwendbarkeit dieser Sonde.

Beschreibung der Bildzeichen



Konformitätsnachweis in Bezug auf die Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.



Achtung, Begleitdokumente beachten!

REF

Diesem Symbol folgt die Artikel- bzw. Bestellnummer des Herstellers.



Diesem Symbol folgt die Chargenbezeichnung des Herstellers.

Reinigungs- und Desinfektionshinweise

Eine Reinigung erfolgt mit Wasser oder Alkohol (z. B. 90%ig) oder gegebenenfalls mit einer weichen Bürste in einer Seifenlösung aus antiseptischer Seife. Für den Fall, dass eine Desinfektion erforderlich wird, sollte eine kalte, bakterizide, fungizide und viruzide Behandlung durchgeführt werden. Hierzu wird eine Desinfektionslösung auf Glutaraldehyd-Basis empfohlen. Spülen Sie anschließend die Sonde nochmals mit genügend Wasser ab, da Desinfektionsmittelrückstände zu (Schleim-)Hautreizungen führen können. Eine heiße Desinfektionsmethode würde die Struktur der Sondenoberfläche beeinträchtigen.

Klassifizierung

Das Produkt Analsonde wird nach Anhang IX der EG-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte in die Klasse IIa eingestuft.

Kombination

Als Einführhilfe ist die Kombination mit dem Spezialsondengel REF 108030 zugelassen.



schwa-medico
Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Straße 41-43 · 35630 Ehringshausen
Tel. 06443 8333-444 · Fax 06443 8333-450
E-Mail hotline-tens@schwa-medico.de · www.schwa-medico.de

Hersteller:
Pierenkemper GmbH
Hörnheimer Eck 19 · 35578 Wetzlar
www.pieren-tech.de
Art.-Nr. 451600-0086

CE 0197