

TENStem eco basic Programmübersicht



Progr.	Bezeichnung	Indikationen	Timer (min)
1	Gate Control 1	Akute nozizeptive Schmerzen, akute und chronische neuropathische Schmerzen	30
2	Gate Control 2	Alternative zu Progr. 1	30
3	Niederfrequenz	Chron. nozizeptive Schmerzen, Durchblutungsverbesserung, zur Kaada-Anlage	30
4	Gate Control + Niederfrequenz	Kombinierte hoch- und niederfrequente Stimulation über spezielle Anlagepunkte	30
5	Anpassung	Muskulär bedingte Schmerzen	30
6	Han	Ideal für fast alle Schmerzindikationen	30
7	Burst	Alternative zu Progr. 3 (angenehmer)	30
8	Modulation	Alternative zu den anderen Programmen bei Therapieresistenz	30

Progr.	Bezeichnung	Indikationen	Timer (min)
9	Muskeltraining	Atrophieprophylaxe	30
10	Dynamic 1	Lockerung der Muskulatur	30
11	Dynamic 2	Lockerung der Muskulatur	30
12	Tief-TENS	Muskulär bedingte Schmerzen, tiefgelegene Schmerzursachen	30
Modifizierbare Programme ab Serie C			
13	Modifizierbare TENS-Stimulation	Schmerztherapie (siehe Programm 1-3)	10-90
14	Modifizierbare Muskelstimulation	Muskulär bedingte Schmerzen, tiefgelegene Schmerzursachen	10-90
15	Modifizierbare Muskellockerung	Lockerung der Muskulatur	10-90
Modifizierbares Programm ab Serie E			
16	Monophasisches Programm	Nervenblockaden nach Jenkner (kann zu Hautrötungen führen)	20



schwa-medico
MENSCHLICHE MEDIZIN

DEUTSCHLAND schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH | Wetzlarer Str. 41 - 43
35630 Ehringshausen | Patienten-Hotline: 06443 8333-444 oder -445 | Fax 06443 8333-450
hotline@schwa-medico.de | schwa-medico.de

ÖSTERREICH schwa-medico Handelsgesellschaft m.b.H. | Industriezeile 25 | 5280 Braunau
Tel. 07722 66122 | Fax 07722 66123 | info@schwa-medico.at | schwa-medico.at

Lesen Sie bitte vor der ersten Anwendung die Sicherheitshinweise und Kontraindikationen/Gegenanzeigen sowie die Anwendungshinweise in der Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.



Pierenkemper GmbH
Am Geiersberg 6
35630 Ehringshausen | Deutschland
www.pierenkemper.eu

