

## Kurzgebrauchsanweisung




### Anlegen der Elektroden oder Sonden

- Platzieren Sie die Elektroden oder Sonden nach Vorgabe Ihres Arztes.



### Auswahl eines Programms

- Gerät mit  einschalten.
- Mit wiederholtem Drücken von  das gewünschte Programm auswählen.


### Starten der Stimulation

- Elektroden mit dem Gerät verbinden, anlegen und Gerät mit  einschalten.
- Mit  und  können Sie jederzeit die Intensität für den jeweiligen Kanal auf einen angenehmen Wert regeln.

### Beenden der Stimulation

- Mit den Tasten  oder  wird die Stimulation direkt gestoppt.
- Nach Ablauf der Timerzeit (programmabhängig) stoppt die Stimulation automatisch.

### Ausschalten des Gerätes

- Über die Taste  schalten Sie das Gerät aus.
- Elektroden auf die Trägerfolie kleben.
- Nach jedem Gebrauch die Sonden reinigen.



## Programmübersicht

Programmnr.	Indikationen	Frequenz/Hz	Impulsbreite/ $\mu$ s	Laufzeit/min	Beschreibung
1	Dranginkontinenz	10	220	10	kontinuierliche Stimualtion
2	Stressinkontinenz	50	220	15	2 s Anstieg, 5 s Arbeit, 1 s Abstieg, 15 s Pause
3	Mischinkontinenz	20	250	12	2 s Anstieg, 5 s Arbeit, 1 s Abstieg, 15 s Pause
4	Analinkontinenz	20	220	12	2 s Anstieg, 5 s Arbeit, 1 s Abstieg, 15 s Pause
5	Sensitivprogramm	25	130	12	3 s Anstieg, 5 s Arbeit, 1 s Abstieg, 15 s Pause
6	Schmerzprogramm	100	180	30	kontinuierliche Stimualtion
7	Akupunkturstimulation	8	200	30	kontinuierliche Stimualtion