

Programm Nr.	Indikationen	Arbeitsweise	Frequenz/Hz	Impulsbreite/ μ s	Timer/min
P1	akute Schmerzen in Folge reflektorischer Muskelverspannungen	Beide Kanäle gleiche Parameter	100	200	20
P2	chronische Muskelschmerzen, Durchblutung	Beide Kanäle gleiche Parameter	2...6...2 in 5 s	automatisch	20
P3	untere Extremität (Beine) 1. Behandlungsphase	Anstieg 2 s, Arbeit 8 s, Abfall 1 s, Pause 16 s, beide Kanäle gleich	40	350	20
P4	obere Extremität (Arme) 1. Behandlungsphase	Anstieg 2 s, Arbeit 8 s, Abfall 1 s, Pause 16 s, beide Kanäle gleich	40	250	20
P5	untere Extremität (Beine) 2. Behandlungsphase	Anstieg 2 s, Arbeit 10 s, Abfall 1 s, Pause 20 s, beide Kanäle gleich	60	400	20
P6	obere Extremität (Arme) 2. Behandlungsphase	Anstieg 2 s, Arbeit 10 s, Abfall 1 s, Pause 20 s, beide Kanäle gleich	60	250	20

Auswahl eines Programms

- Gerät mit der Taste **⏻** einschalten
- Mit wiederholtem Drücken der Taste **P** das gewünschte Programm auswählen

Starten der Stimulation

- Elektroden mit dem Gerät verbinden und anlegen
- Erhöhung der Intensität mit der Taste **+** für den jeweiligen Kanal

Stoppen der Stimulation


- Mit den Tasten **P** oder **⏻** wird die Stimulation direkt gestoppt
- Nach Ablauf der Therapiezeit stoppt die Stimulation automatisch

Gerät verriegeln/entriegeln

Links die Taste **⏻** und die Taste **P** gleichzeitig für 2 s bei eingeschaltetem Gerät drücken

Timer aus-/einschalten

Beim Einschalten des Gerätes gleichzeitig links die Tasten **+** und **⏻** gedrückt halten

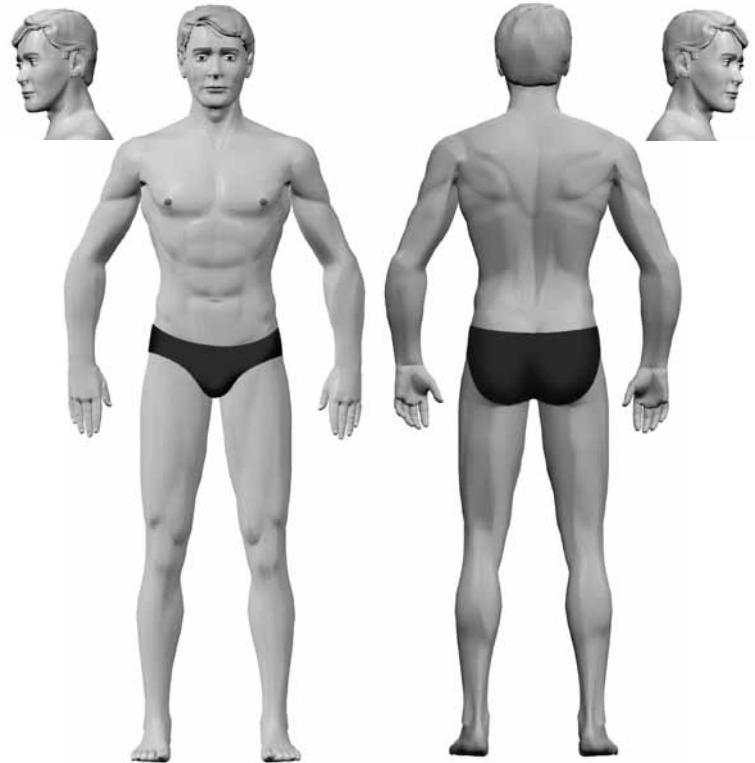

P1

P2

P3

P4

P5

P6