



PierenStim Parese

KURZ-GEBRAUCHSANWEISUNG



<i>Programm (P)</i>	<i>Indikationen</i>	<i>Impulsform</i>	<i>Impulsbreite</i>	<i>Impulspause</i>	<i>Therapiezeit</i>
1	geringe Lähmungen	Rechteck	50 ms	0,5 s	15 min
2	mittelschwere Lähmungen	Trapez	150 ms	1,5 s	15 min
3	schwere Lähmungen	Dreieck	300 ms	3,0 s	15 min
4	geringe Lähmungen (alternativ zu P 1)	Impulsgruppe Rechteck	50 ms	0,5 / 1,5 s	15 min
5	mittelschwere Lähmungen (alternativ zu P 2)	Impulsgruppe Trapez	150 ms	1,5 / 4,5 s	15 min
6	schwere Lähmungen (alternativ zu P 3)	Impulsgruppe Dreieck	300 ms	3,0 / 9,0 s	15 min
7	Diagnose 1	Rechteck	1000 - 10 ms	1 s	
8	Diagnose 2	Dreieck	1000 - 10 ms	1 s	

Programmauswahl

- » Gerät mit der Taste **⏻** einschalten
- » Durch Drücken der Taste **P** gewünschtes Programm auswählen

Starten und Stoppen der Stimulation

- » Elektroden anlegen, mit dem Gerät verbinden und mit der Taste **⏻** einschalten
- » Über linke **+**-Taste Intensitätsregelung bis zur Muskelanspannung (mit **-**-Taste auch Intensitätsverringern möglich)
- » Nach Ablauf der Therapiezeit schaltet das Gerät automatisch ab; mit den Tasten **P** oder **⏻** ist ein Direktstopp jederzeit möglich

Pause

- » Durch Drücken der Taste **E** ist jederzeit eine Therapieunterbrechung möglich: „Pause“ erscheint im Display
- » Bei erneutem Drücken der Taste **E** wird Therapie fortgesetzt

Programmsperre

- » Drücken der Tastenkombination linke **-**-Taste und **P** bei eingeschaltetem Gerät verriegelt das Gerät (aktuelles Programm nicht veränderbar)
- » Erneutes Drücken der gleichen Tastenkombination entriegelt das Gerät wieder

Editiermodus

- » Einschalten mit gedrückter Taste **E**: „E“ erscheint rechts unten im Display
- » Mit der Taste **P** zu editierendes Programm wählen
- » 1 x die Taste **E** drücken: Impulsbreite zwischen 10 ms und 2 s einstellbar (linke **+** **-**-Taste in 100 ms Schritten; rechte **+** **-**-Taste in 10 ms Schritten)
- » **E**-Taste erneut drücken: Impulspause einstellbar (linke **+** **-**-Taste in 1 s Schritten, rechte **+** **-**-Taste in 100 ms Schritten)
- » **E**-Taste noch mal drücken: Therapiezeitwahl zwischen 1 und 99 min bzw. „OFF“

Diagnosemodus

- » P 7: Rechteckimpuls; Start mit Sequenz 1, Hochregeln der Intensität bis zur Zuckung, in I/t-Formblatt eintragen; Fortsetzung bis Sequenz 8 in gleicher Art und Weise
- » P 8: Dreieckimpuls; gleiches Vorgehen wie bei P 7

