

- » Befeuchten Sie Ihre beiden Hände mit Leitungswasser.
- » Ziehen Sie beide STIMEX® Stimulationshandschuhe vorsichtig an. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Produktes.
- » Schalten Sie das Elektrostimulationsgerät ein und erhöhen Sie die Intensität, bis sich ein deutlich spürbares Stromgefühl einstellt. Therapieren Sie nach Vorgabe des verordnenden Arztes.
- » Schalten Sie vor dem Entfernen der STIMEX® Stimulationshandschuhe immer zuerst das Elektrostimulationsgerät aus.

Reinigungs- und Pflegehinweise

- » Lassen Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhe nach der Therapie und nach dem Waschen lufttrocknen.
- » Waschen Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhen bitte separat, bei maximal 30 °C, per Handwäsche. Falls nötig, benutzen Sie zur Reinigung ein flüssiges Feinwaschmittel und waschen Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhe anschließend mit klarem Leitungswasser aus.
- » Wringen Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhe nicht aus!

Angaben zu den verwendeten Handschuhmaterialien

STIMEX® Stimulationshandschuhe bestehen aus Baumwolle mit eingewebten Edelstahlfäden.

Angaben zu verwendbaren / zugelassenen Elektrostimulationsgeräten

Die STIMEX® Stimulationshandschuhe können mit allen von uns produzierten Elektrostimulationsgeräten verwendet werden.



PIERENKEMPER GmbH
 Pierenkemper GmbH
 Am Geiersberg 6 · 35630 Ehringshausen · Deutschland
 Tel. +49 6443 8333-955 · Fax +49 6443 8333-950
 info@pierenkemper.eu · www.pierenkemper.eu



schwa-medico
 MENSCHLICHE MEDIZIN

Vertrieb DEUTSCHLAND
 schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
 Wetzlarer Str. 41 - 43 | 35630 Ehringshausen | Tel. 06443 8333-110
 Fax 06443 8333-119 | info@schwa-medico.de | schwa-medico.de

Vertrieb ÖSTERREICH
 schwa-medico Handelsgesellschaft m.b.H.
 Industriezeile 25 | 5280 Braunau | Tel. 07722 66122
 Fax 07722 66123 | info@schwa-medico.at | schwa-medico.at

Artikelnummer: 451600-0438 Version 1 Stand: 2017-01-16

Stimulationshandschuhe



STIMEX®

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Menge
107014	Stimex Stimulationshandschuhe	S	1 Paar
107021	Stimex Stimulationshandschuhe	M	1 Paar
107022	Stimex Stimulationshandschuhe	L	1 Paar

Anwendungshinweise

Bitte lesen Sie vor Gebrauch der STIMEX® Stimulationshandschuhe die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und orientieren Sie sich an den Bildzeichen auf der Verpackung der STIMEX® Stimulationshandschuhe. Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Produktes.



Stecken Sie den Stecker vom Anschlusskabel des Elektrostimulationsgerätes in den beiliegenden Druckknopfadapter und clippen Sie diesen auf den jeweiligen Druckknopf am Bund der STIMEX® Stimulationshandschuhe.



Ziehen Sie beide STIMEX® Stimulationshandschuhe vorsichtig an.



Schalten Sie das Elektrostimulationsgerät ein und erhöhen Sie die Intensität, bis sich ein deutlich spürbares Stromgefühl einstellt. Therapieren Sie nach Vorgabe des verordnenden Arztes.



Verwenden Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhe nicht auf verletzter oder erkrankter Hautoberfläche.



Berühren Sie während der Therapie mit den STIMEX® Stimulationshandschuhen keine metallischen Gegenstände.



Bringen Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhe während der Therapie nicht in Kontakt zueinander.




Tragen Sie während der Therapie mit den STIMEX® Stimulationshandschuhen keine Uhr und keinen Schmuck wie z. B. Ringe oder Armbänder.



Berühren Sie während der Therapie mit den STIMEX® Stimulationshandschuhen keine elektronischen Geräte wie z. B. Mobiltelefone oder Fernseher.



Waschen Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhen bitte separat, bei maximal 30 °C, per Handwäsche. Wringen Sie die STIMEX® Stimulationshandschuhe nicht aus!

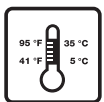

Die STIMEX® Stimulationshandschuhe nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C und über 35 °C verwenden.

Zweckbestimmung

STIMEX® Stimulationshandschuhe sind zur Anwendung am Menschen bestimmt und ein Medizinprodukt. STIMEX® Stimulationshandschuhe dienen der vollflächigen leitfähigen Verbindung von Elektrostimulationsgerät mit den Händen eines Patienten, um das Gerät gemäß seiner Zweckbestimmung anzuwenden. Die STIMEX® Stimulationshandschuhe dienen der Zufuhr von elektrischer Energie. Sie sind ausschließlich auf unverletzter Hautoberfläche zu verwenden. Sie sind zur Anwendung am Menschen bestimmt. Der Einsatzbereich wird durch das verwendete Elektrostimulationsgerät bestimmt.

Kontraindikationen

- » Wunden und Hauterkrankungen im Handschuhbereich
 - » Unverträglichkeit gegenüber den verwendeten Handschuhmaterialien
- Bitte beachten Sie zusätzlich die angegebenen Kontraindikationen des verwendeten Elektrostimulationsgerätes.

Sicherheitshinweise

- » Eine Überdehnung des Bundes kann zum Nahtausriss an der innenseitigen Isolierung des Druckknopfes führen! Dadurch kann es zum direkten Hautkontakt mit dem Druckknopf kommen, was Hautschäden zur Folge haben kann. Bitte vergewissern Sie sich deshalb vor jeder Verwendung des Produktes, dass die Isolierung intakt ist.
- » Tragen Sie während der Therapie keinen metallischen Schmuck wie z. B. Armbketten oder Ringe.
- » Bei unzureichendem Stromgefühl bitte die Hände vor der Verwendung der STIMEX® Stimulationshandschuhe mit Leitungswasser anfeuchten.
- » Vor dem Entfernen der STIMEX® Stimulationshandschuhe immer das Elektrostimulationsgerät ausschalten.
- » STIMEX® Stimulationshandschuhe können Hautirritationen verursachen durch eine Unverträglichkeit oder Allergie gegenüber den verwendeten Handschuhmaterialien. Bei Auftreten von Hautirritationen ist vor einer weiteren Anwendung ärztlicher Rat einzuholen.
- » Um eventuelle Hautirritationen zu vermeiden, sollten die STIMEX® Stimulationshandschuhe nur so lange wie für die Therapie nötig getragen werden.
- » Die STIMEX® Stimulationshandschuhe sollten aus hygienischen Gründen nur von einer Person benutzt werden.

Anwendung

- » Stecken Sie den Stecker vom Anschlusskabel des Elektrostimulationsgerätes in den beiliegenden Druckknopfadapter und clippen Sie diesen auf den jeweiligen Druckknopf am Bund der STIMEX® Stimulationshandschuhe.