



STIMEX[®]

Gebruiksaanwijzing Art.-Nr. 102122

Stimulatiesokken

Art.-Nr.	Grootte	aantal
107023	M (38-41)	1 paar
107024	L (42-45)	1 paar
107067	XL (44-46)	1 paar



schwa-medico

MEDISCHE APPARATEN

schwa-medico Nederland B. V.
Koningin Julianaplein 10 | 3931 CK Woudenberg
Tel. 033 4655064 | Fax 033 4612223
E-mail info@schwa-medico.nl | www.schwa-medico.nl



Pierenkemper GmbH
Am Geiersberg 6 | 35630 Ehringshausen | Duitsland
Pierenkemper.eu **CE0482**

REF 451600-0489 Stand: 2021-06-15



schwa-medico

MEDISCHE APPARATEN

Beoogd gebruik

STIMEX® stimulatiesokken zijn een medisch hulpmiddel Klasse I.

Het zijn groot-oppervlakte-elektroden voor elektrosimulatie van de gehele voet/enkel, voor het beoogde doel in overeenstemming met de toepassing ervan.

Indicatie

(Waarvoor kan ik gebruik maken van de sokken?)

DeSTIMEX® stimulatiesokken kunnen in plaats van zelfklevende elektroden worden gebruikt bij alle pijnen op de voeten. De specifieke medische aandoeningen staan in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte elektrostimulator aangegeven.

Contra-indicaties

(Wanneer mag ik de sokken niet of alleen na overleg met de bevoegde arts gebruiken?)

- » Wonden en huidaandoeningen in het gebied van de voet
- » Onverenigbaarheid met de sok gebruikte materialen
- » **Let op:** lees **ook** de "contra-indicaties" van het gebruikte elektrostimulatie-apparaat.

Veiligheidsinstructies

- » Een overrekking van de stof kan leiden tot het scheuren van de binnen isolatie van de drukknop leiden. Door direct huidcontact met de drukknop kan beschadiging van de huid ontstaan. Overtuig u ervan dat de isolatie intact is.
- » Draag tijdens de therapie **geen metalen sieraden** zoals enkelbanden of piercings.
- » Raak **tijdens de therapie met de voeten geen metalen voorwerpen** aan.
- » Laat de sokken elkaar niet aanraken. Mogelijk ontstaat er kortsluiting, waardoor de stimulatie beëindigt. Of wanneer het contact tussen de sokken kortdurend was, kunt u een onaangename elektrische schok ervaren.
- » Zet **vóór** het uittrekken van de STIMEX® stimulatiesokken altijd de elektro-stimulator uit.

- » STIMEX® stimulatiesokken kunnen huidirritaties veroorzaken door een intolerantie of allergie voor in de sok gebruikte materialen. Bij het optreden van huidirritatie is voor een verdere toepassing medisch advies van uw arts raadzaam.
- » Om eventuele huidirritaties te voorkomen moeten de STIMEX® stimulatiesokken niet langer dan nodig voor de therapie gedragen worden.
- » De STIMEX® stimulatiesokken mogen om hygiënische redenen slechts door één persoon worden gebruikt.

Toepassing

- » Steek de stekker van de aansluitkabel van het elektrostimulatietoestel in de meegeleverde drukknopadapter op de sok en klik het op de daarvoor bedoelde kliksluiting op de boord van de STIMEX® stimulatiesokken.
- » U kunt of één sok gebruiken of beide. Bij gebruik van één sok heeft u ook een zelfklevende elektrode nodig. Let op de aanbevelingen voor de toepassing van de elektroden in de instructie voor het gebruik van het elektrostimulatieapparaat.
- » Maak de sokken flink nat met leidingwater. Om het makkelijker te maken is het raadzaam de sokken aan te trekken voordat u ze flink natmaakt.
- » Trek de STIMEX® stimulatiesokken voorzichtig aan. Let op de Veiligheidsinstructies voor het gebruik van dit product.
- » Schakel, na het aansluiten, het elektrostimulatieapparaat in en verhoog de intensiteit tot een duidelijk waarneembaar gevoel van elektriciteit. Behandel u zelf volgens voorschrift van de voorschrijvende arts.
- » Voordat u de STIMEX® stimulatiesokken uittrekt, moet u altijd eerst het elektrostimulatieapparaat uitschakelen.

Reinigings- en verzorgingsinstructies

- » Laat je de STIMEX® stimulatiesokken na de behandeling aan de lucht drogen.
- » Was de STIMEX® stimulatiesokken a.u.b. apart, met de hand, op 30°C. Indien nodig, gebruik dan een fijnwasmiddel en spoel de sokken daarna goed uit.
- » Wring de STIMEX® stimulatiesokken niet uit!

Verkorte gebruiksaanwijzing

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en kijk naar de symbolen op de verpakking van de Stimex® stimulatiesokken. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het gebruiken van het product.



Steek de stekker van de aansluitkabel van het elektrostimulatietoestel in de meegeleverde drukknopadapter op de sok en klik het op de daarvoor bedoelde kliksluiting op de boord van de STIMEX® stimulatiesokken.



Trek de Stimex® stimulatiesokken voorzichtig aan en maak ze daarna goed nat.



Schakel, na het aansluiten, het elektrostimulatieapparaat in en verhoog de intensiteit tot een duidelijk waarneembaar gevoel van elektriciteit. Behandel u zelf volgens voorschrift van de voorschrijvende arts.

Informatie over de sok gebruikte materialen

STIMEX® stimulatiesokken zijn gemaakt van polyester, elastaan, polyurethaan, met ingeweven dunne roestvrijstalen draden.

Informatie over de te gebruiken goedgekeurde apparaten voor elektrische stimulatie:

De STIMEX® stimulatiesokken kunnen met alle door Pierenkemper GmbH geproduceerde elektrische stimulatieapparaten worden gebruikt.



Gebruik geen Stimex® stimulatiesokken wanneer de huid van de voeten verwond is of wanneer u daar een huidaandoening hebt.



Raak je tijdens de therapie met de sokken geen metalen voorwerpen aan.



Laat de sokken elkaar tijdens de therapie niet aanraken.



Draag tijdens de therapie geen metalen sieraden zoals enkelbanden of piercings.



Was de STIMEX® stimulatiesokken a.u.b. apart, met de hand, op 30°C. Wring de STIMEX® stimulatiesokken niet uit!



Gebruik de STIMEX® stimulatiesokken niet bij een temperatuur onder de 5 en boven de 35 °C.