




TENS eco 2 eenvoudige gebruiksaanwijzing

Uw persoonlijke hulp bij pijn

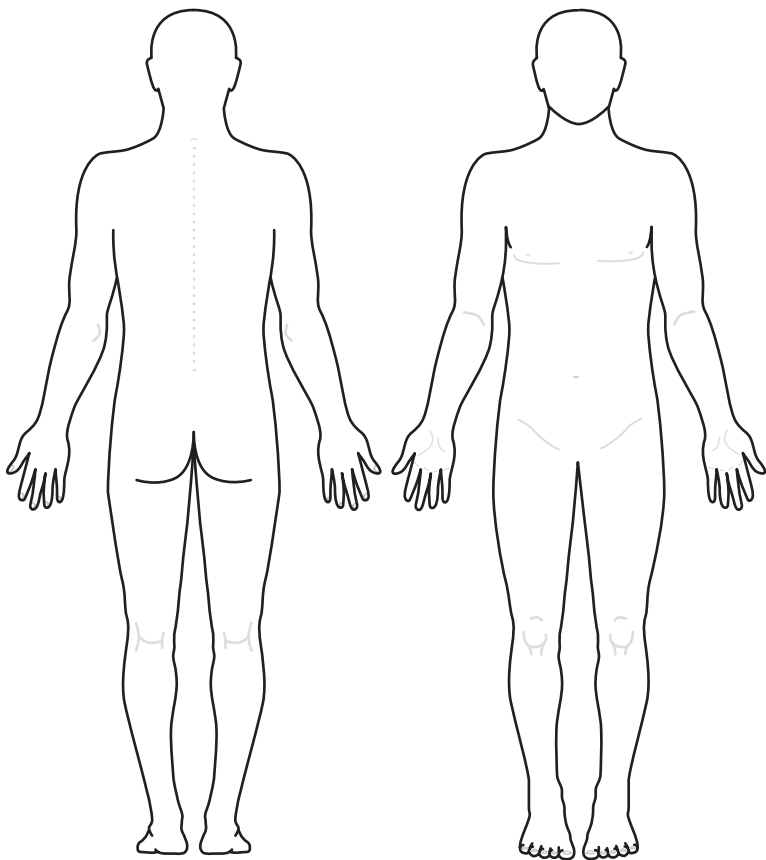

		Programma's
P 1	U 1	Gate control (100 Hz)
P 2	U 2	Gate control (80 Hz)
P 3	U 3	Lage frequentie (2 Hz)
P 4	U 4	Kanaal 1 gate control (100 Hz) Kanaal 2 lage frequentie (2Hz)
P 5	U 5	Aanpassing: 10 minuten gate control (100 Hz) 20 minuten lage frequentie (2 Hz)
P 6	U 6	HAN-stimulatie: 100 Hz en 2 Hz ledere 3 seconde wisselend
P 7	U 7	Burst
P 8	U 8	Modulatie (2 – 80 – 2 Hz in 15 seconde)
P 9	U 9	Spierstimulatie
P 10	U 10	Gate control, dynamisch langzaam
P 11	U 11	Gate control, dynamisch snel
P 12	U 12	Diepte TENS

..... x per dag.

Uw persoonlijke hulp bij pijn

Attentie: sluit de kabel(s) aan op het apparaat, verbind die met de elektroden en plak deze op de huid, voordat u de TENS eco 2 inschakelt en de stroom opvoert!

Het schuifknopje aan de onderzijde van het apparaat moet op ON staan.

1. Aan/uit schakelaar
2. Programmakeuze: Druk op **P** om het juiste programma te kiezen
3. Intensiteitsregeling: **intensiteit kanaal 1** **intensiteit kanaal 2**
 stroom omhoog stroom omhoog
stroom omlaag stroom omlaag
4. ON-OFF schakelaar


Attentie: de intensiteit wordt automatisch vergrendeld als deze 5 seconde niet is veranderd. Ontgrendelen doet u door eerst de stroom omlaag te brengen.

Stimulatie stoppen

Druk 2 seconde op **P** om de stimulatie handmatig te stoppen.

Opladen

Let er op of de LED op de oplader op rood staat tijdens het opladen !

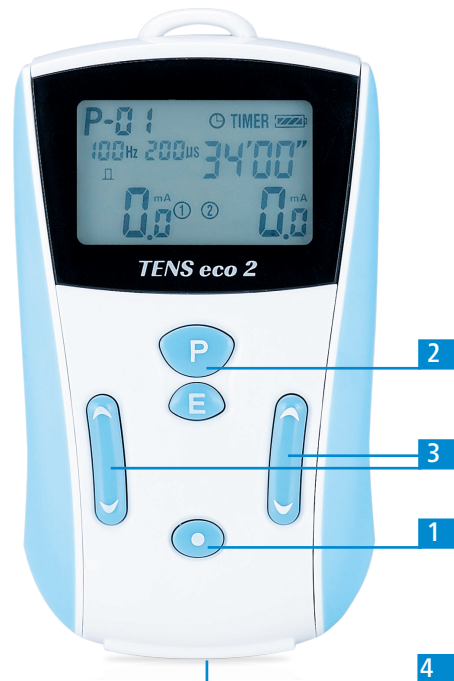

Schakelaar op OFF tijdens opladen!



schwa-medico
MEDISCHE APPARATEN

schwa-medico Nederland B.V. · Koningin Julianaplein 10 · 3931 CK WOUDEBERG
tel.: 033 4655064 · fax: 033 4612223 · email: info@schwa-medico.nl · www.schwa-medico.com