

PROGRAMY

Pro-gram	Opis	Zastosowanie	Czas/M
1	„Bramka Sterowana 1” GateControl1	Ostre nocyceptyczne bole, ostre bole, bol neuropatyczny	30
2	„Bramka Sterowana2” GateControl2	Alternatywa do Pr.1	30
3	Niska czestotliwosc	Przewlekłe nocyceptyczne bole, poprawa krążenia, Stymulacja zwana Kada.	30
4	Bramka Sterowana+ Niska czestotliwosc	Połączenie wysokiej i niskiej czestot- liwosci przy pomocy specjalnego umiejscowienia Elektrod.	30
5	Adaptacja	Bole muskularne	30
6	Han	Idealne dla wszystkich rodzajow bolu	30
7	Burst	Alternatywa do Pr.3	30
8	Modulacja	Alternatywa do innych programow, przy ktorych jest wykazywana rezystencja na stymulacje.	30

Pro-gram	Opis	Zastosowanie	Czas/M
9	Stymulacja miesni	Profilaktyka przy zaniku miesni	30
10	Dynamiczny 1	Rozluźnienie, zlagodzenie napiecia miesniowego	30
11	Dynamiczny2	Rozluźnienie, zlagodzenie napiecia miesniowego	30
12	Gleboki Tens	Bole muskularne, bol „gleboko” umiejscowiony	30
ZMODYFIKOWANE PROGRAMY, Urządzenie od Serii C			
13	Zmodyfikowane stymulacja Tens	Terapia bolu popatrz Pr.1-3	10-90
14	Zmodyfikowana stymulacja miesni	Bole muskularne	10-90
15	Zmodyfikowane zlagodzenie	napiecia miesniowego	10-90
ZMODYFIKOWANY PROGRAM, Urządzenie od Serii E			
16	Jednofazowe	Jenkner blokada (moze spowodowac zaczerwienienie skory)	30



schwa-medico
MEDIZINTECHNIK

DEUTSCHLAND schwa-medico Medizinische Apparate Vertriebsgesellschaft mbH
Wetzlarer Str. 41 - 43 | 35630 Ehringshausen | Tel. 06443 8333-444 | Fax 06443 8333-450
info@schwa-medico.de | schwa-medico.de | schwa-medico.com | shop.schwa-medico.de

ÖSTERREICH schwa-medico Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriezeile 25 | 5280 Braunau | Tel. 07722 66122 | Fax 07722 66123 | info@schwa-medico.at | schwa-medico.at

